

2in1 耳栓セット

取扱説明書

型番：TEP-001ECO

同梱品



高遮音耳栓
(イヤーチップMを装着)



ノイズキャンセリング耳栓
(イヤーチップS装着)



二層イヤーチップ



イヤーチップXL



イヤーチップXS



エコ収納袋



製品の取扱説明書は、製品改善のため不定期に更新される場合があります。正確な情報を確認するためには、QRコードをスキャンして最新の説明書を入手してください。

ご使用上の注意事項

- 耳栓を使用する前に必ず水で洗い、清潔な状態にしてください。
- 耳栓を強く押し込むと、耳の内部に傷をつけることがあります。優しく耳の穴に挿入してください。
- 耳栓を長時間装着しすぎないように注意してください。
- 耳栓がフィットしない場合、使用を中止してください。
- 耳栓を使用している間は、周囲の音が聞こえにくくなりますので、運転中等の時は絶対に使用しないこと。
- 痛みや異常を感じた場合は、使用を中止し、医師に相談してください。
- 直射日光や高温多湿の場所を避けて保管してください。
- 子供やペットの手の届かない場所に保管してください。(誤食事故の原因)
- 乾燥な状態で保管してください。汗や水などで濡れたまま放置すると、カビや雑菌が繁殖する可能性があります。
- 本製品の本来の用途以外で使用しないでください。

使用方法

- 先端(イヤーチップのある端)を耳の穴に挿入します。
- 耳栓を少しずつ回転させながら、しっかりと耳の穴にフィットさせます。
- 耳栓が正しく装着されているかどうかを確認します。耳栓が完全に耳の穴に入り込み、違和感や緩みがなければ、正しく装着されています。

お手入れについて

- 使用後は、流水で洗い流して水分をよく切ってから、清潔な場所で保管してください。また、皮脂や汚れ等が付着した場合は、中性洗剤を使って落としてください。次回使用前には、必ず清潔な状態にしてから使用してください。